

Simboli & Messaggi

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.

Modalità dello strumento



Diario



Medie

~A1c Stima di A1c



Impostazioni

Frecche di tendenza

(Modalità diario )

(e Modalità ~A1c ~A1c)



Tendenza in aumento



Tendenza in diminuzione



Stazionaria

Visualizzazione della stima di A1c (~A1c)

(Modalità ~A1c ~A1c)



Numero di giorni prima che sia necessario un nuovo profilo glicemico



Percentuale di ~A1c

Classificazione PASTO



Nessuna classificazione



A digiuno



Prima del pasto



Dopo il pasto

Visualizzazione delle medie

(Modalità medie )




Numero di letture usate nel calcolo



Numero di giorni usati nel calcolo

Impostazione di data & ora

(Modalità impostazioni )



Impostazione dell'ora



Impostazione della data


MyStar
Extra®

Simboli & Messaggi

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.

Visualizzazione del risultato di un test della glicemia

Risultato del test

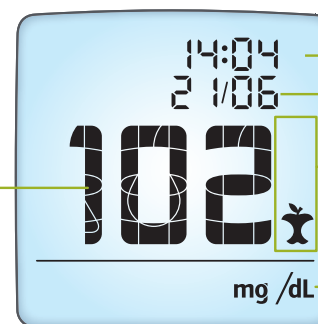

Ora

Data

Classificazione pasto (visualizzata qui)

Unità di misura



Si è verificato un errore



Risultati della soluzione di controllo



Applicare il campione alla striscia reattiva



Al di fuori dell'intervallo di temperatura operativa del sistema



Il risultato del test della glicemia è inferiore a 20 mg/dl



Batteria in esaurimento



Il risultato del test della glicemia è superiore a 600 mg/dl



Batteria esaurita

Visualizzazione del Diario (Risultati memorizzati)

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.


Pulsanti dello strumento:



Visualizzazione del Diario:

[1] Quando lo strumento è disattivato, premere il pulsante CONFERMA per accedere alla modalità DIARIO. Viene visualizzato il risultato più recente.

[2] Premere i pulsanti freccia ALTO e BASSO per scorrere tra le singole letture nel diario.

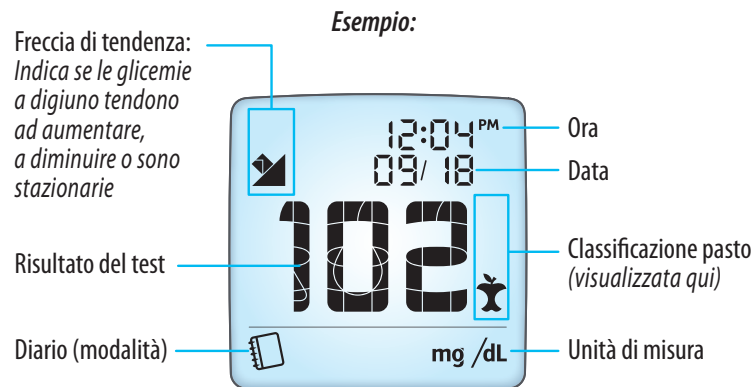

Come modificare la classificazione PASTO mentre si è in modalità diario:

[1] Premere il pulsante PASTO. La classificazione pasto della lettura visualizzata inizierà a lampeggiare.

[2] Premere il pulsante PASTO per scorrere fra le diverse icone di classificazione pasto. Premere il pulsante CONFERMA per confermare la classificazione pasto desiderata.

MyStar[®]
Extra[®]

Visualizzazione delle Medie

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.


Pulsanti dello strumento:



Visualizzazione delle Medie:

[1] Quando lo strumento è disattivato, premere il pulsante CONFERMA per attivarlo. Viene visualizzato il risultato più recente.

[2] Premere nuovamente il pulsante CONFERMA per accedere alla modalità MEDIE.

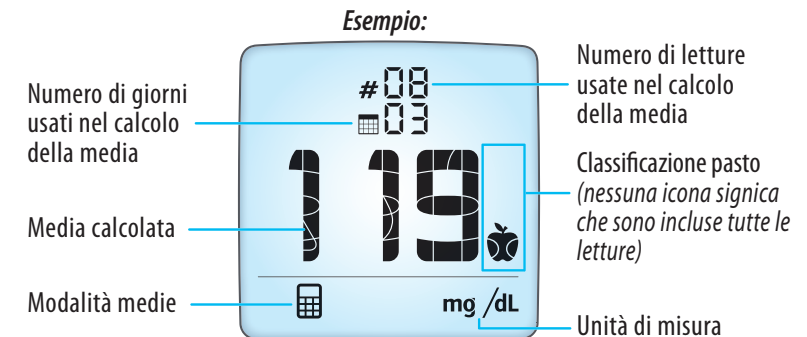

[3] Premere il pulsante PASTO Per scorrere fra le medie di:

Tutte le letture (nessuna icona)

🍏 Letture "A digiuno"

🍏 Letture "Prima del pasto"

🍷 Letture "Dopo il pasto"

Premere i pulsanti freccia ALTO o BASSO per scorrere fra le medie calcolate su diversi giorni:

📅 03 3 giorni

📅 07 7 giorni


📅 30 30 giorni

Test della glicemia


Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.

IMPORTANTE: Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per istruzioni più dettagliate di ogni singolo passaggio per eseguire un test.


[1] Inserire la striscia reattiva nello strumento

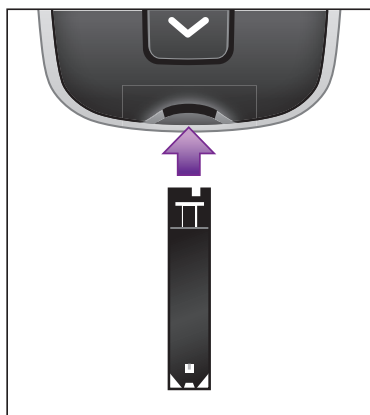

[2] Pungere l'area di prelievo

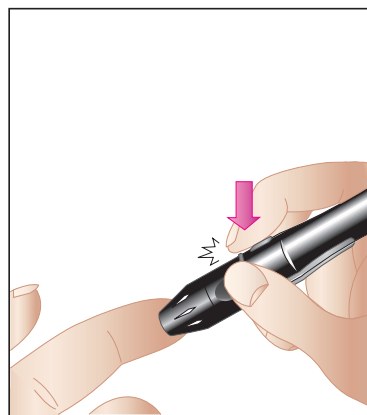

[3] Mettere la striscia reattiva a contatto con il campione

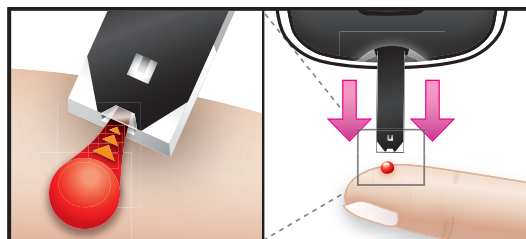

Test della glicemia

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.

MyStar
Extra®





Pulsante PASTO




Pulsante CONFERMA

[4] Rimuovere la striscia reattiva dal campione di sangue quando l'indicatore visivo di riempimento diventa completamente rosso. Lo strumento emette un beep quando si deve rimuovere la striscia reattiva dal campione di sangue.

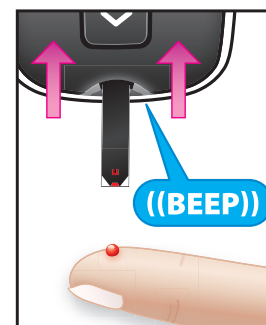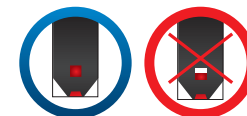

[5] Visualizzare i risultati del test e classificarli in funzione del PASTO.

Sul display viene visualizzato il risultato del test della glicemia con ora e data, con la classificazione PASTO suggerita che lampeggia.

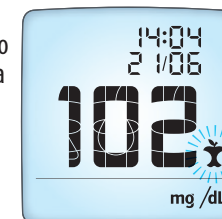

Per modificare la classificazione PASTO premere il pulsante PASTO. Premere il pulsante CONFERMA per confermare la classificazione PASTO, che smetterà di lampeggiare.

Nessuna classificazione	Prima del pasto
A digiuno	Dopo il pasto

[6] Passaggio finale.

Rimuovere la striscia reattiva usata. Lo strumento si disattiverà automaticamente.

Strumento e Strisce reattive

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar E xtra® per le istruzioni per l'uso complete.



**MyStar
Extra®**

Impostazione dell'ora e della data

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar E xtra® per le istruzioni per l'uso complete.

Pulsanti dello strumento:



Freccia ALTO



Freccia BASSO



CONFERMA

[1] Quando lo strumento è disattivato, tenere premuto il pulsante CONFERMA per accedere alla modalità di impostazione.

Selezionare il formato orario (12 o 24 ore) e premere il pulsante CONFERMA per confermare.

Verrà visualizzata l'icona di impostazione (🔧) con l'orario lampeggiante in fianco all'icona ora (🕒).


[2] Premere i pulsanti freccia BASSO o ALTO, per impostare l'ora (lampeggiante).

Premere il pulsante CONFERMA per confermare.

Ripetere il passaggio **[2]** fino a che ora e data sono impostate correttamente.

[3] Tenere premuto il pulsante CONFERMA per uscire dalla modalità di impostazione.

Esempio di impostazione dell'ora (lampeggiante):

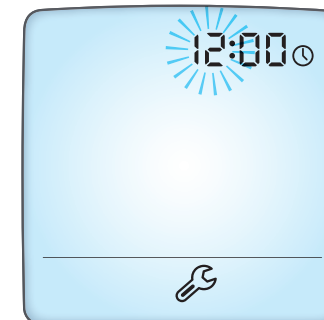

Per domande di tipo tecnico:

Numero Verde
800-131212

Visualizzazione della stima di A1c (~A1c)

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.

Per ottenere un risultato di ~A1c, eseguire nell'ordine i seguenti passaggi:

[1] **Creare un "Profilo"**

[2] **Confermare** che è stato creato un "Profilo"

[3] **Eseguire** i test della glicemia a digiuno, uno ogni giorno per 6 giorni dopo il giorno "Profilo"

[1] **Creare un "profilo"**


Un "Profilo" consiste di 7 misurazioni della glicemia effettuate in 1 giorno.

- Effettuare 7 misurazioni della glicemia usando lo schema "Profilo".


	Schema profilo	
	Numero della misurazione nel profilo	Classificazione
1.	A digiuno (4:00 - 8:59)	A Digiuno
2.	Dopo colazione (9:00 - 10:59)	Dopo il pasto
3.	Prima di pranzo (11:00 - 14:59)	Prima del pasto
4.	Dopo pranzo (15:00 - 16:59)	Dopo il pasto
5.	Prima di cena (17:00 - 19:59)	Prima del pasto
6.	Dopo cena (20:00 - 21:59)	Dopo il pasto
7.	Al momento di coricarsi (22:00 - 23:59)	Nessuna classificazione

[2] **Confermare che è stato creato un "Profilo"**

Attivare lo strumento premendo il pulsante (✓). Apparirà la schermata "Diario" (📅) che mostra le letture di glicemia più recenti. Premere due volte il pulsante (✓).

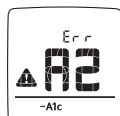

"Profilo" creato
Se viene visualizzato il messaggio "A2", il "Profilo" è stato creato con successo; ora è necessario effettuare 6 letture della glicemia "A Digiuno" (fare riferimento al paragrafo [3] **Eseguire i test della glicemia "A Digiuno"**).

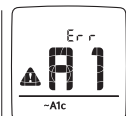

"Profilo" Non creato
Se viene visualizzato il messaggio "A1", fare riferimento a **Risoluzione dei problemi del "Profilo"**.

MyStar
Extra®

Stima di A1c (~A1c)

Fare riferimento al Manuale per l'uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l'uso complete.

[3] **Eseguire i test della glicemia "A Digiuno"**

Dopo che è stata confermata la creazione di un "Profilo", effettuare una misurazione della glicemia "A digiuno" ogni giorno per i 6 giorni successivi. Effettuare un test della glicemia "A Digiuno" quando non si ha assunto alcun cibo o bevanda (ad eccezione dell'acqua) per almeno 8 ore (solitamente subito dopo il risveglio). Classificare la glicemia "A Digiuno" premendo il pulsante (📅) fino a quando viene visualizzata l'icona (📅).

Visualizzare i risultati di ~A1c


Attivare lo strumento premendo il pulsante (✓). Verrà visualizzata la schermata "Diario" (📅) che mostra i risultati dei test della glicemia più recenti. Premere due volte il pulsante (✓).

Se sono stati effettuati un numero sufficiente di letture della glicemia "A Digiuno", verrà visualizzato un risultato di ~A1c (esempio di ~A1c).

Continuare ad ottenere risultati di ~A1c

Per ottenere un risultato di ~A1c ogni giorno, continuare a eseguire un test della glicemia "A Digiuno" ogni giorno e creare un "Profilo" una volta ogni 32 giorni

Esempio di una schermata di ~A1c:

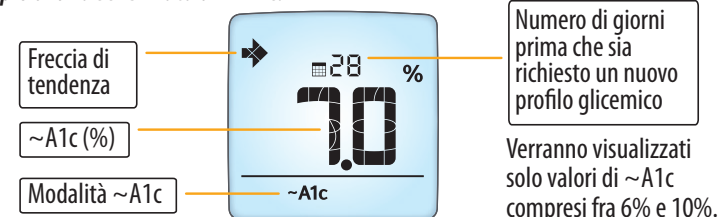

ATTENZIONE: Non usare questi valori di ~A1c per prendere decisioni in merito al trattamento. Tutte le modifiche del trattamento devono essere decise su consiglio di un medico.