

# Guida rapida

## MyStar Plus™ Sistema di monitoraggio della glicemia

**Assistenza clienti: 800 131212**

In caso di emergenza, contattare il medico o il pronto soccorso.



**SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA  
CON L'APP TRAMITE  
tecnologia wireless Bluetooth®**

Per l'associazione e la sincronizzazione fare riferimento ai passaggi riportati sul retro.

### Batterie sostitutive incluse.

Nella custodia dello strumento sono incluse due batterie al litio CR2032 da 3 volt. Fare riferimento alle istruzioni per la sostituzione della batteria sul retro.

### Informazioni sul sistema

Il sistema di monitoraggio della glicemia MyStar Plus™ consente di controllare i livelli della glicemia con il sangue intero capillare. Per istruzioni complete, vedere il Manuale per l'uso di MyStar Plus™

**AVVERTENZA:** il pungidito MyStar SylkFeel DEVE essere utilizzato SOLO per ottenere un campione di sangue da una singola persona per l'auto-test. Non utilizzare alcuna lancetta o alcun pungidito che siano stati utilizzati da un'altra persona.


### Strumento per la determinazione della glicemia

- 1) **Area di visualizzazione**
- 2) **Apertura per l'inserimento di strisce reattive**
- 3) **Pulsante dello strumento:** premere per accendere lo strumento e visualizzare i precedenti risultati dei test della glicemia.



### Striscia reattiva

- 1) **Barre di contatto:** inserire questa estremità nell'apertura per strisce reattive
- 2) **Indicatore visivo:** si riempie completamente quando viene applicato un campione sufficiente
- 3) **Area di campionamento:** qui viene applicato il sangue o la soluzione di controllo

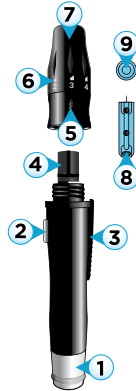

### Sistema pungidito

- 1) **Leva di caricamento**
- 2) **Pulsante di rilascio**
- 3) **Sistema di espulsione**
- 4) **Supporto lancetta**
- 5) **Indicatore di profondità del prelievo**
- 6) **Cappuccio del pungidito regolabile**
- 7) **Cappuccio del pungidito**
- 8) **Lancetta**
- 9) **Cappuccio della lancetta**

*Nota: è necessario sincronizzare lo strumento con MyStar Plus™ App per impostare la data e l'ora dello strumento prima dei test. Questo garantirà l'invio dei risultati dallo strumento in modalità wireless all'app. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al retro di questa Guida rapida o vedere il Manuale per l'uso.*


### Passaggi del test della glicemia

(Per le istruzioni complete, vedere il Manuale per l'uso di MyStar Plus™)

#### 1 Inserire la striscia reattiva nello strumento:

Inserire la striscia reattiva nell'apposita apertura per l'inserimento delle strisce, con le barre di contatto rivolte verso l'alto. Lo strumento sarà attivato automaticamente.

**ATTENZIONE:** per assicurarsi di ottenere risultati accurati, lavare le mani con acqua tiepida e sapone, risciacquarle e asciugarle accuratamente prima di ogni test.

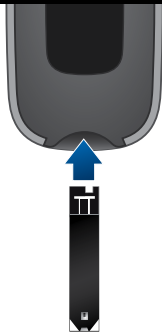


#### 2 Pungere l'area di prelievo:

Per preparare il pungidito, fare riferimento alle istruzioni a destra.

Mantenere fermo il pungidito contro il polpastrello.


Premere il pulsante di rilascio per ottenere un campione di sangue.

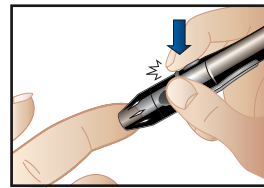

#### 3 Ottenere una goccia di sangue:

Comprimerne il dito dalla base verso l'alto in direzione del polpastrello finché non si forma una piccola goccia di sangue.

Non premere nelle immediate vicinanze dell'area incisa.

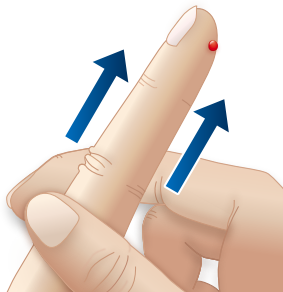

#### 4 Portare la striscia reattiva a contatto con il campione di sangue:

Lo strumento visualizza l'animazione "Applicare il campione alla striscia reattiva", indicando che è pronto per l'applicazione del sangue.

La striscia reattiva assorbe il sangue al suo interno attraverso l'area di campionamento.



#### 5 Rimuovere dal campione quando l'indicatore visivo della striscia reattiva diventa completamente rosso e lo strumento emette un segnale acustico:

Il simbolo "Campione applicato" sarà visualizzato sullo schermo dello strumento e sarà emesso un segnale acustico per indicare che occorre rimuovere la striscia reattiva dal campione di sangue.

L'indicatore visivo diventerà completamente rosso.

L'animazione "Calcolo" sarà visualizzata sul display dello strumento per indicare il calcolo del risultato del test da parte dello strumento.



#### 6 Visualizzare il risultato del test e operazioni finali:

Dopo l'animazione Calcolo, il risultato del test sarà visualizzato sul display dello strumento. Il risultato del test viene salvato nella memoria dello strumento.

Rimuovere la striscia reattiva usata dallo strumento. Lo strumento si spegnerà automaticamente.

Staccare il cappuccio del pungidito e riposizionare il cappuccio della lancetta. Rimuovere la lancetta usata.


Smaltire correttamente la lancetta e la striscia reattiva usate. Per lo smaltimento, seguire le istruzioni dell'operatore sanitario.

102 mg/dL




### Preparare il sistema pungidito


#### 1 Rimuovere il cappuccio ruotandolo in senso antiorario.

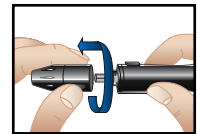


#### 2 Inserire una nuova lancetta direttamente nel supporto per lancette.

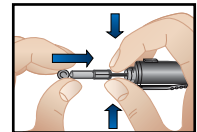


#### 3 Impugnando saldamente la lancetta, rimuovere il cappuccio della lancetta.

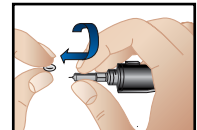


#### 4 Riposizionare il cappuccio del pungidito.

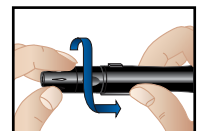

#### 5 Impostare la profondità del pungidito. Da 1 (cute sottile) a 5 (cute spessa).

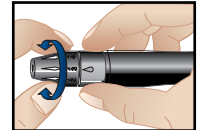

#### 6 Estrarre la leva di caricamento finché non scatta.

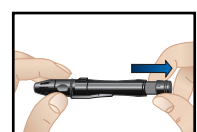

# Guida rapida

MyStar Plus™  
Sistema di monitoraggio della glicemia



SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA  
CON L'APP TRAMITE  
tecnologia wireless Bluetooth®

Nota: è necessario sincronizzare lo strumento con l'app MyStar Plus™ App per impostare la data e l'ora dello strumento prima dei test. Questo garantirà l'invio dei risultati dallo strumento in modalità wireless all'app.

## Istruzioni per la sostituzione della batteria

**IMPORTANTE:** con lo strumento MyStar Plus™ utilizzare solo batterie CR2032 o DL2032.

### Messaggi relativi alla batteria visualizzati sul display



**Messaggio batteria in esaurimento:** (questo messaggio viene visualizzato per 2 secondi) È ancora possibile eseguire un test quando viene visualizzato un messaggio di batteria in esaurimento, ma è necessario sostituire le batterie prima possibile. Utilizzare solo batterie CR2032 o DL2032.



**Messaggio batteria scarica:** Le batterie dello strumento non dispongono di carica sufficiente ad attivare lo strumento ed eseguire il test e devono essere sostituite.

### Sostituzione delle batterie (Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale per l'uso di MyStar Plus™).

**IMPORTANTE:** quando le batterie vengono sostituite, la data e l'ora saranno cancellate dallo strumento. È necessario sincronizzare lo strumento con il dispositivo supportato per garantire che le letture riportino data e ora. Per sincronizzare lo strumento, fare riferimento alle istruzioni a destra.

Nota: la rimozione delle batterie non influisce sulle registrazioni della glicemia memorizzate.


## 1 Aprire lo sportello della batteria:

Assicurarsi che lo strumento sia spento. Capovolgere lo strumento per individuare lo sportello della batteria. Rimuovere lo sportello della batteria dallo strumento facendolo scorrere.



## 2 Rimuovere le batterie usate:

Rimuovere le batterie usate con un utensile non metallico.

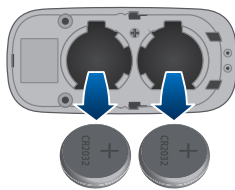


Batterie usate

## 3 Installare le batterie nuove:

Nella tasca della custodia dello strumento sono incluse due batterie sostitutive.

Individuare le batterie sostitutive.


Installare le nuove batterie con il segno positivo (+) rivolto verso di se.

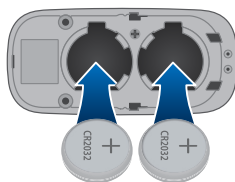

Batterie nuove

## 4 Chiudere lo sportello della batteria:

inserire lo sportello della batteria nello strumento facendolo scorrere. Assicurarsi che lo sportello della batteria sia completamente chiuso prima di utilizzare lo strumento.

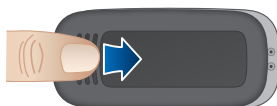

Smaltire le batterie usate in base alle normative ambientali locali.

## Istruzioni per l'associazione e la sincronizzazione

MyStar Plus™ App funziona su diversi dispositivi iOS e Android™. Per visualizzare un elenco aggiornato, visitare l'App Store o Google Play™.

### Associazione e sincronizzazione dello strumento con l'App

Utilizzare lo strumento MyStar Plus™ con MyStar Plus™ App per sincronizzare i risultati della glicemia direttamente con il dispositivo Android o iOS.

È necessario sincronizzare lo strumento con l'App MyStar Plus™ App per impostare la data e l'ora dello strumento prima dei test. Questo garantirà l'invio dei risultati dallo strumento in modalità wireless all'App sul dispositivo supportato.

## 1 Scaricare e aprire l'app:


Scaricare MyStar Plus™ App dall'App Store (per dispositivi Apple) o da Google Play™ (per dispositivi Android).



Toccare l'icona dell'App sul dispositivo supportato.

## 2 Accedere all'icona del menu:

Toccare l'icona con tre righe.

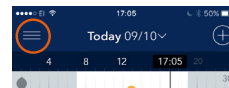

## 3 Aggiungere un nuovo strumento:

Toccare "Strumenti". Toccare "Aggiungi un nuovo strumento".

Sullo strumento, tenere premuto il pulsante dello strumento. Selezionare lo strumento quando compare nell'App.

## 4 Immettere la chiave di accesso:

Esempio di una chiave di accesso:

Nello strumento sarà visualizzata una chiave di accesso di 6 cifre. Digitare il numero della chiave di accesso nell'App.



## 5 Confermare che l'associazione è stata eseguita correttamente:

Esempio di un segno di spunta:

Sia lo strumento che l'App indicheranno che l'associazione ha avuto esito positivo. Lo strumento presenterà un segno di spunta e l'App mostrerà un messaggio.



## 6 Sincronizzare i dati:

Dopo che è stato associato al proprio dispositivo, lo strumento sincronizzerà o trasferirà i dati ogni volta che è in prossimità del dispositivo associato.

Nota: lo strumento e l'App devono trovarsi nel raggio di 10 metri l'uno dall'altro per poter eseguire l'associazione e trasferire i dati.

## 7 Associare dispositivi aggiuntivi:

È possibile associare lo strumento a un massimo di 7 dispositivi supportati. Seguire la stessa procedura sopra indicata per ciascun dispositivo che si desidera sincronizzare con lo strumento.

**AVVERTENZA:** non associare lo strumento a un'App su un dispositivo utilizzato da un'altra persona. I dati sincronizzati dello strumento non possono essere eliminati dall'App. Se si esegue l'associazione con lo strumento di un'altra persona, i dati di ciascuno strumento si mescoleranno nell'App e potrebbero determinare risultati non corretti.



0123 AgaMatrix, Inc. 7C Raymond Avenue  
Salem, NH 03079 USA



MDSS GmbH, Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germania

Il marchio Bluetooth e il logo sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sanofi è stato concesso in licenza. Altri marchi commerciali e nomi di marchi sono dei rispettivi proprietari. Apple e il logo Apple sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android è un marchio commerciale di Google Inc. Google Play è un marchio commerciale di Google Inc.