

## دليل إرشادي سريع

لا يتطلب أي رمز  
كمية الدم لكل عينة - 0.5 ميكرو لتر  
مدة الفحص - 6 ثواني\*  
سعة الذاكرة - 1865 نتيجة فحص

هام: راجع دليل استعمال BGStar® لكي تقوم خطوة خطوة بالإجراءات اللازمة لإجراء الفحص.

بواسطة BGStar® يمكن إجراء فحص نسبة السكر في الدم من خلال استعمال عينات مأخوذة من طرف الإصبع أو من راحة اليد (عند قاعدة الإبهام) أو من الذراع (راجع دليل الاستعمال لتحديد مكان أخذ العينة بدقة).




### الجهاز

- 1 شاشة صغيرة
- 2 زر التأكيد
- 3 زر الإضاءة الخلفية
- 4 زر السهم لأسفل
- 5 زر السهم لأعلى
- 6 فتحة لإدخال الأشرطة

### شريحة متفاعلة

- 1 منطقة متفاعلة
- 2 مؤشر مرئي
- 3 منطقة العينة

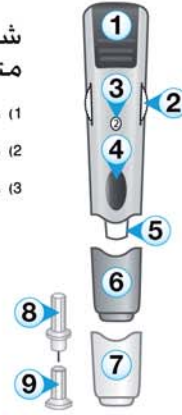

### أداة وخز الإصبع

- 1 رافعة القذح
- 2 مربع خديد العمق
- 3 مؤشر العمق
- 4 زر الإعتاق
- 5 حامل المشروط
- 6 غطاء أداة وخز الإصبع
- 7 غطاء لأخذ عينة من مناطق بديلة
- 8 مشروط
- 9 غطاء المشروط

\*المدّة المتوسطة للفحص

### خطوات اختبار السكر في الدم

(للحصول على التعليمات بشكل كامل راجع دليل استعمال BGStar®)

#### 1 أدخل شريط جديد متفاعل في الأداة

أدخل الشريط المتفاعل في فتحة إدخال الأشرطة. مع مراعاة أن تكون المنطقة المتفاعلة باتجاه الأعلى. يتم تشغيل الأداة بشكل أوتوماتيكي.

تنبيه: للحصول على نتائج دقيقة، اغسل اليدين بالماء الفاتر والصابون وجففهما قبل إجراء كل فحص.



#### 2 أؤخذ مكان أخذ الدم


راجع تعليمات تحضير أداة وخز الإصبع المتواجدة على اليمين. اضغط أداة وخز الإصبع على المكان المطلوب وخره اضغط زر الإعتاق.



#### 3 اعصر نقطة الدم


تخلص من أول نقطة دم سحبتها بواسطة قطعة قماش أو محرمة ورق نظيفة.

اضغط ابتداء من قاعدة الإصبع واجهه نحو طرف الإصبع. لكي تخرج نقطة دم أخرى.

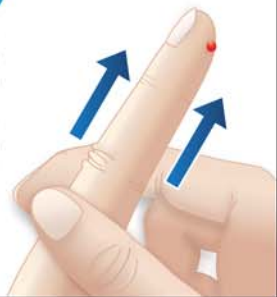

#### 4 ضع الشريط المتفاعل بشكل ملائم لنقطة الدم

يمتص الشريط المتفاعل الدم إلى داخله عن طريق منطقة العينة.

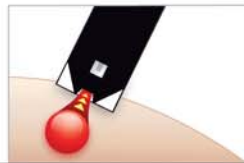

#### 5 أبعد الشريط المتفاعل عن عينة الدم عندما تطلق الأداة صوت بيب

تطلق الأداة صوت بيب لكي تدل على أنه يجب إبعاد طرف الشريط المتفاعل عن العينة. يدل شريط التقدم بالأرقام 1 - 2 - 3 على أن الأداة تقوم بحساب النتائج.



يصبح المؤشر الرئتي أحمر بشكل كلي.

#### 6 عمليات نهائية


ينتهي الفحص. عندما تظهر نتيجة الفحص مع التاريخ والوقت على الشاشة. عند الضغط على زر التأكيد. يتم التأكيد على تصنيف الوجبات. ويتوقف الجهاز عن الوميض.

أبعد الشريط المتفاعل المستعمل. يتوقف الجهاز عن العمل بشكل أوتوماتيكي. أبعد غطاء أداة وخز الإصبع.



### تحضير أداة وخز الإصبع

#### 1 أبعد غطاء أداة وخز الإصبع

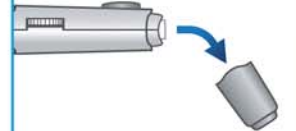

#### 2 أدخل مشروط جديد في حامل المشروط.



#### 3 لف غطاء المشروط إلى غاية إبعاده.



#### 4 أعد تركيب غطاء أداة وخز الإصبع.



#### 5 اضبط مستوى أداة وخز الإصبع.



#### 6 اسحب رافعة القذح إلى غاية أن تسمع طقة.

