

快速指南

无需密码

测试采血量 - 0,5微升 (µL)

测试时间 - 6秒

数值记忆量 - 1865组

请注意: 请先详细阅读BGStar®使用说明书, 以详细了解操作方式与适当的测试步骤

BGStar®血糖仪可利用采取以下部位的血液进行血糖值测试: 指尖、手掌(大拇指下方)与前臂(请阅读说明书以了解正确采血位置与采血方式)。



工具

- 1) 屏幕
- 2) 确认键
- 3) 背光显示键
- 4) 箭头往下键
- 5) 箭头往上键
- 6) 试纸插入孔

试纸

- 1) 测试反应区
- 2) 目测区
- 3) 滴血区



采血器

- 1) 装载开关
- 2) 扎针深度调节器
- 3) 扎针深度指示器
- 4) 出针钮
- 5) 针座
- 6) 采血器护盖
- 7) 其他区域采血专用套
- 8) 采血针
- 9) 采血针护盖



*平均测试时间

血糖测试仪的基本操作

(为详细了解操作方式与适当的测试步骤, 请先详细阅读BGStar®使用说明书。)

1 请将新的试纸插入血糖仪中

将试纸的测试反应区朝上, 再确实的将试纸插入血糖仪的试纸插入孔。血糖仪将自动开启。


请注意: 为了得到较正确的测试结果, 请于每次测试前以温水与香皂将双手洗净。



2 采血

请先参考右方的采血器组装与使用方式。


将采血器稳固的抵住需要采血的区域。按出针钮。

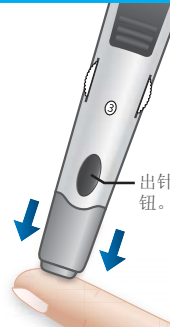

3 挤血


请先移除挤出的第一滴血, 可利用干净的面纸、手帕或柔软的手巾擦拭。

以由下往上、朝指尖的方向轻微的挤压手指, 直到挤出另一滴血。

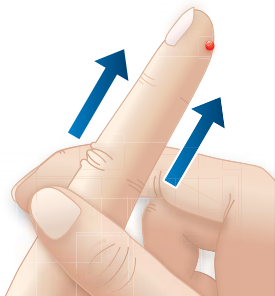

4 将试纸边缘靠近血滴以取得血液测试样本

试纸的滴血区将会自动吸入血液。

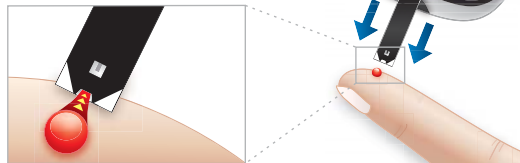

5 当血糖仪发出哔生时可移开手指

血糖仪将发出哔声, 此时即可将手指移开。当屏幕展现进度显示条与数字1-2-3时, 表示血糖仪正在计算测试结果。




目测区必须完全的充血直到完整的呈现红色状态

6 最后阶段


当屏幕显示血糖值与完整的日期和时间时, 表示已完成血糖的测试。请按确认键以确认选择空腹或饭后的选, 确认后此选项将停止闪烁。

取出使用过的试纸。血糖仪将自动的关闭。取下采血器护盖。套上采血针护盖。取下使用过的采血针。最后将使用过的试纸与采血针依据当地的相关规定丢弃于适当的地点。

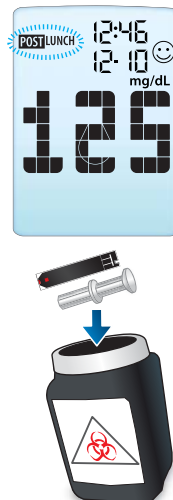

采血器组装与使用方式


1 转开采血器护盖。

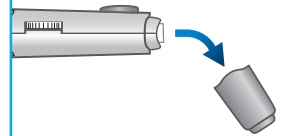


2 确实的将全新的干净采血针插入针座。




3 旋转采血针护盖直到取下护盖。

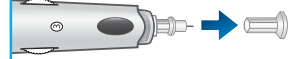

4 再度套上采血器护盖。

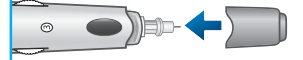

5 设定扎针深度。

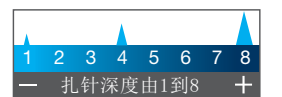

6 拉取装载开关直到有定格的喀嚓感觉。

