



Guia rápido

Não é necessário nenhum código
Quantidade de sangue por amostra – 0,5 µL
Duração do teste – 6 segundos*
Memória – 1.865 testes

IMPORTANTE: Consulte o manual de uso do BGStar® para obter uma descrição mais detalhada, passo a passo, da execução do teste.

Com o sistema BGStar® é possível executar um teste da glicemia, utilizando amostras de sangue colhidas nas pontas dos dedos, nas palmas das mãos (na base do polegar) e nos antebraços (consulte o manual de uso para conhecer os pontos exactos de colheita).

*Duração média do teste.


Informações acerca do sistema BGStar®



- Medidor**
- 1) Visor
 - 2) Botão de CONFIRMAÇÃO
 - 3) Botão de RETRO-ILUMINAÇÃO
 - 4) Botão da seta para BAIXO
 - 5) Botão da seta para CIMA
 - 6) Abertura para a introdução das tiras



- Tira de reacção**
- 1) Área reactiva
 - 2) Indicador visivo
 - 3) Área di

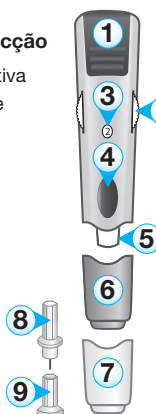

- Dispositivo de punção**
- 1) Patilha de carregamento
 - 2) Quadrante de regulação da profundidade
 - 3) Indicador de profundidade
 - 4) Botão de expulsão
 - 5) Suporte da lanceta
 - 6) Tampa do dispositivo de punção
 - 7) Tampa para colheita de áreas alternativas
 - 8) Lanceta
 - 9) Tampa da lanceta

Passos da execução de um teste da glicemia

(Para as instruções completas, consulte o manual de uso do BGStar®)

1 Introduza uma lanceta de reacção nova no medidor

Introduza a tira de reacção, com a parte reactiva virada para cima, na ranhura para a introdução das tiras. O medidor será assim activado automaticamente.

ATENÇÃO: para assegurar resultados com exactidão, lave as mãos com água morna e sabão e enxugue-as bem antes de cada teste.



2 Picar a área de colheita

Consulte as instruções para a preparação do dispositivo de punção, à direita.


Carregue o dispositivo de punção na área a picar. Carregue no botão de expulsão.



3 Espreme a gota de sangue


Elimine a primeira gota de sangue extraída utilizando um pano ou um lenço de papel limpos.

Comprima a base do dedo, de baixo para cima, na direcção da ponta do dedo até que saia outra gota de sangue.

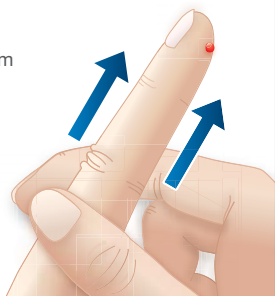

4 Toque com a tira de reacção na amostra de sangue


A tira de reacção absorve o sangue no interior da tira, através da área de amostragem.

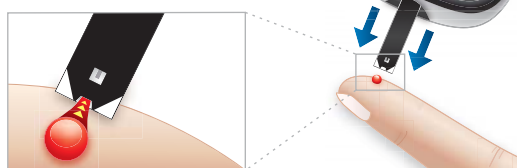

5 Retire a tira de reacção da amostra de sangue quando ouvir o som do medidor

O medidor emite um som para indicar que a extremidade da tira de reacção deve ser retirada da amostra. A barra de progresso e os números 1-2-3 indicam que o medidor está a calcular os resultados.

((BEEP))

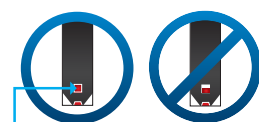


O indicador visual torna-se totalmente vermelho.



6 Operações finais


O teste acabou quando aparece no visor o resultado do teste da glicemia, incluindo a data e a hora. Premindo o botão CONFIRMAR, é confirmada a Classificação da Refeição e deixa de piscar.

Retire a tira de reacção usada. O medidor desactiva-se automaticamente. Retire a tampa do dispositivo de punção. Coloque a tampa da lanceta. Retire a lanceta usada. Elimine correctamente a tira de reacção usada e a lanceta.

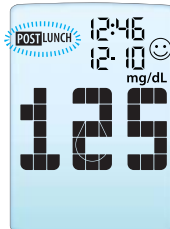

Preparação do dispositivo de punção


1 Retire a tampa do dispositivo de punção.

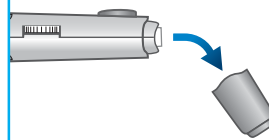


2 Introduza bem uma lanceta nova no suporte para lancetas.



3 Rode a tampa da lanceta até soltá-la.

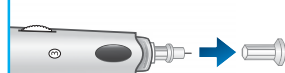

4 Reintroduza a tampa do dispositivo de punção.

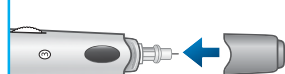

5 Regule o nível do dispositivo de punção.



6 Extraia a patilha de carregamento até sentir um clique.

