

## Başvuru Kılavuzu

Kodlamaya gerek yok  
Örnek Büyüklüğü – 0,5 µL  
Test Süresi – 6 saniye\*  
Bellek– 1.865 Test Sonucu

ÖNEMLİ: Testi nasıl yapacağınıza ilişkin daha ayrıntılı adım adım bilgi için BGStar® Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

BGStar® Sisteminizle parmak uçlarınızda, avuçlarınızda (başparmak tabanında) veya ön kollarınızda kan şekerinizi ölçebilirsiniz (kesin konumlar için Kullanıcı Kılavuzuna bakın).

\*Ortalama test süresi.

## BGStar® Sistemi Hakkında




### Cihaz

- 1) Ekran
- 2) ONAY Düşmesi
- 3) Arka Işık Düşmesi
- 4) AŞAĞI Ok Düşmesi
- 5) YUKARI Ok Düşmesi
- 6) Çubuk Portu



### Test Çubuğu

- 1) Temas Baraları
- 2) Görsel Dolum Penceresi
- 3) Örnek Alanı

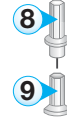

### Delme Cihazı

- 1) Kurma Kolu
- 2) Derinlik Ayar Kadranı
- 3) Derinlik Göstergesi Penceresi
- 4) Serbest Bırakma Düşmesi
- 5) Lanset Yuvası Başlığı
- 6) Delme Cihazı Başlığı
- 7) Alternatif Bölge Test Başlığı
- 8) Lanset
- 9) Lanset Kapağı

### Kan Şekeri Test Adımları

(Tam talimatlar için BGStar® Kullanıcı Kılavuzuna bakın)

#### 1 Test çubuğunu ölçüm cihazına takın:

Temas baraları yukarı bakacak şekilde test çubuğunu test çubuğu portuna takın. Ölçüm cihazı otomatik etkinleşecektir.


**DİKKAT:** Doğru sonuçların elde edilmesini sağlamak için her testten önce ılık ve sabunlu suyla ellerinizi yıkayın ve kurulayın.



#### 2 Test bölgesini delin:

Sağ tarafta delme cihazının nasıl hazırlanacağına ilişkin talimatları okuyun.


Delme cihazını delinecek bölgeye bastırın. Serbest bırakma düşmesine basın.

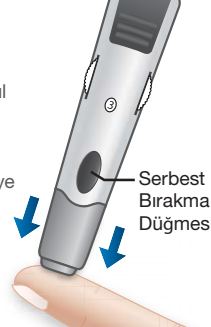

#### 3 Kan damlası alın:


Görünen ilk kan damlasını temiz bir kumaş veya kağıt havluyla silin.

Parmağınızı tabanından üst ucuna doğru ikinci küçük bir kan damlası oluşana kadar sıkın.

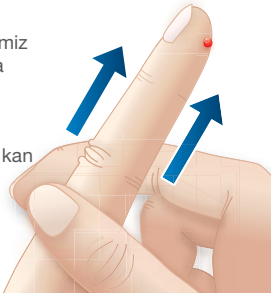


#### 4 Test çubuğunu kan örneğine yaklaştırın:

Test çubuğu, örnek alanı üzerinden kanı test çubuğunun içine doğru çeker.

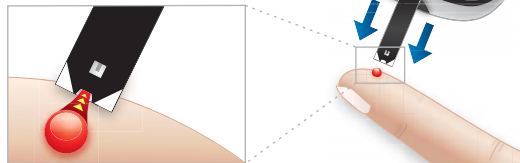

#### 5 Bip sesini duyunca Test Çubuğunu Kan Örneğinden Çekin:

Ölçüm cihazınız bir kere bip sesi çıkarınca test çubuğunun ucunu kan örneğinden çekmelisiniz. Kayan çubuk ve 1-2-3, ölçüm cihazının sonuçlarınızı hesapladığını gösterir.

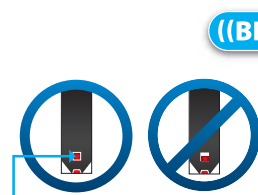

Tüm görsel dolum penceresi kırmızıya dönecektir.

#### 6 Son Adımlar:


Kan şekeri testinizin sonucu saat ve tarihle birlikte ekran üzerinde gösterildiğinde testiniz tamamlanmış demektir. ONAY düşmesine basmanız, yemek zamanı etiketini onaylar ve yanıp sönmeye durur.

Kullanılmış olan test çubuğunu kaldırın. Ölçüm cihazı otomatik olarak kapanacaktır. Delme cihazından başlığını çıkarın. Lanset kapağını yeniden takın. Kullanılmış olan lanseti çıkarın. Kullanılmış olan test çubuğu ve lanseti uygun şekilde atın.



### Delme Cihazını Hazırlama


#### 1 Delme cihazının başlığını çıkarın.

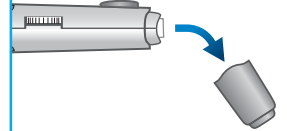


#### 2 Lanset yuvası başlığına yeni bir lanseti sıkıca takın.



#### 3 Lanset kapağını çıkarın.

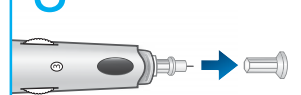

#### 4 Delme cihazı başlığını yeniden takın.

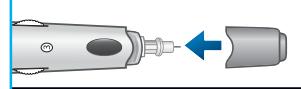

#### 5 Delme düzeyini ayarlayın.



#### 6 Kurma kolunu tıkkayana kadar çekin.

